


# Injektionsanleitung für die Anwendung des metex® PEN


- ▶ Diese Injektionsanleitung ersetzt nicht die Packungsbeilage. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage aufmerksam durch, bevor Sie die Injektion starten.
- ▶ Die Anwendung des metex® PEN erfolgt nur 1x wöchentlich.

**1 x pro  
Woche**

## Der metex® Pen Fertigen

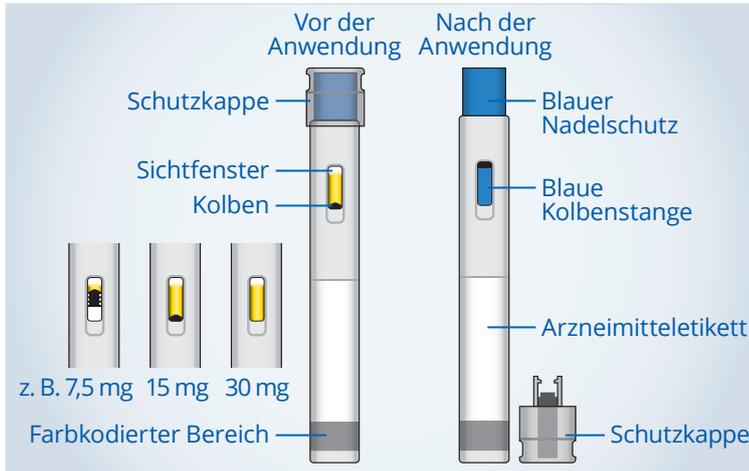


## Was Sie für Ihre Injektion benötigen

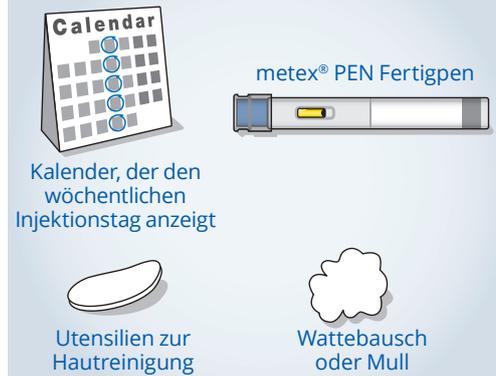


## Vorbereiten der Injektion




Waschen Sie sich die Hände und packen Sie Ihren Fertigen aus

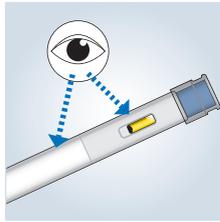

Prüfen Sie den Fertigen vor der Anwendung

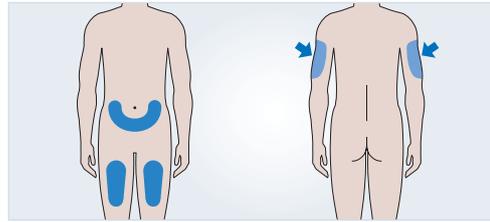


Wählen Sie eine Injektionsstelle an Bauch oder Oberschenkel. In den Oberarm darf nur eine Pflegeperson injizieren.

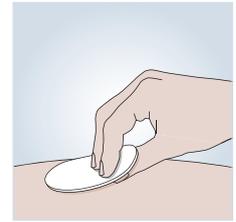


Reinigen Sie die Injektionsstelle


## Durchführen der Injektion

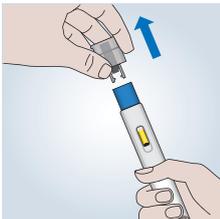

Ziehen Sie die Schutzkappe nach oben ab

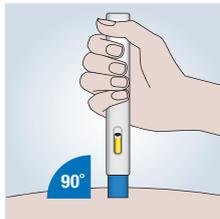


Positionieren Sie den Fertigen und setzen ihn leicht auf die Haut. Sie sind jetzt bereit für die Injektion

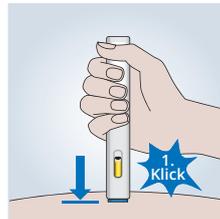

Beginnen Sie die Injektion, indem Sie den Fertigen zügig und vollständig herunterdrücken




Halten Sie den Fertigen in Position, um die Injektion abzuschließen

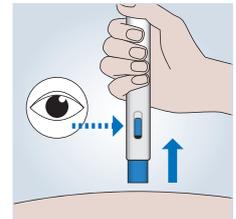

Beenden Sie die Injektion

## Nach der Injektion

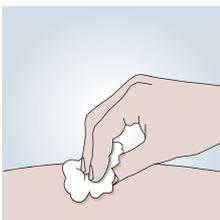

Tupfen Sie mögliche Tropfen von Blut mit einem Wattebausch ab.



Entsorgen Sie den benutzten Fertigen im Hausmüll

Um zum Injektionsvideo zu gelangen  
scannen Sie den QR Code oder besuchen  
**[metex-pen.de/patientenbereich/metex-pen](https://metex-pen.de/patientenbereich/metex-pen)**

