



1 x pro Woche

MÖGLICHE KÖRPERREGIONEN FÜR DIE SELBSTINJEKTION


Um Hautreizungen vorzubeugen, wählt man jeweils für die wöchentliche Gabe eine andere Injektionsstelle. Wenden Sie den Fertigpen nur auf gereinigter Haut an.

Folgende Stellen sind am besten für die Injektion geeignet:


- ▶ die Oberschenkel
- ▶ der Bauch — ausgenommen der Bereich um den Nabel

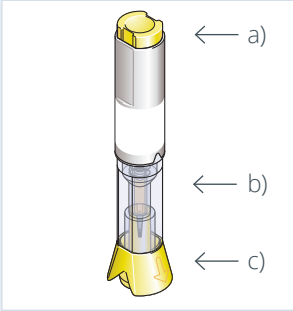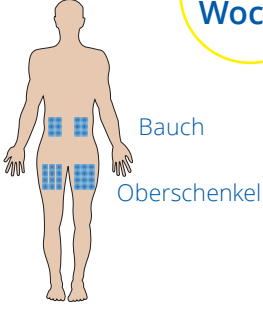

a) Injektionsknopf
b) Sichtfenster
c) Schutzkappe

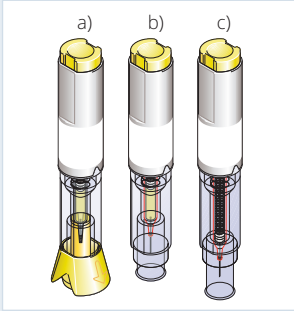


a) vor der Injektion, mit Schutzkappe
b) nach der Entfernung der Schutzkappe, vor Injektion
c) nach der Injektion

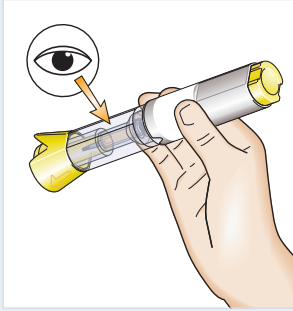


Bitte prüfen Sie den Fertigpen durch das Sichtfenster auf Unversehrtheit, bevor Sie ihn verwenden.

1 Schutzkappe gerade abziehen

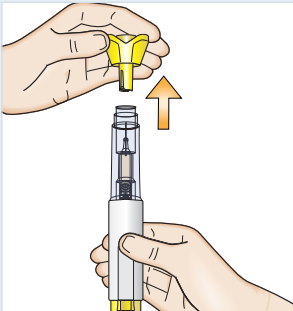


Ziehen Sie die gelbe Schutzkappe unmittelbar vor der Injektion gerade nach oben ab.

2 Hautfalte bilden

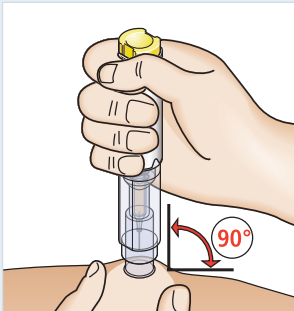


Bilden Sie mit zwei Fingern eine Hautfalte. Halten Sie die Hautfalte, bis Sie komplett injiziert haben.

3 Positionieren

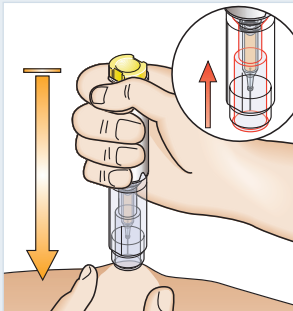


Setzen Sie den Fertigpen senkrecht auf die Hautfalte auf. Drücken Sie den Fertigpen fest auf die Hautfalte, bis Sie den Nadelschutz (transparente Röhre) zurückgeschoben haben, um so den Injektionsknopf zu entriegeln.

4 Injizieren

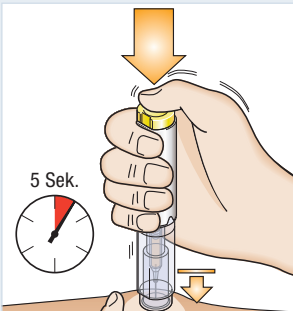

Lösen Sie den Injektionsknopf aus, während Sie weiterhin den Fertigpen auf die Hautfalte gedrückt halten. Die Injektion startet mit einem klickenden Geräusch. Warten Sie 5 Sekunden, bis die Flüssigkeit komplett injiziert wurde.

5 Herausziehen / Entsorgen

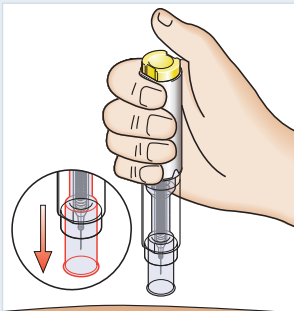

Ziehen Sie den Fertigpen vorsichtig und gerade heraus. Drücken Sie mit einem Tupfer auf die Injektionsstelle. Die Nadel wird automatisch geschützt. Nach erfolgter Injektion können Sie den Fertigpen im Hausmüll entsorgen.