


مرة
واحدة كل
أسبوع

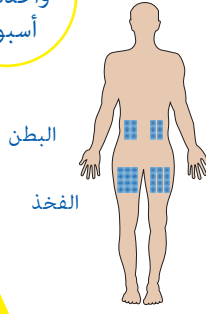


مناطق الجسم الممكن إجراء الحقن ذاتياً بها

لتجنب حدوث تهيجات بالجلد يتم اختيار موضع حقن مختلف لكل جرعة أسبوعية. لا تستخدم القلم الجاهز إلا على الجلد الذي تم تنظيفه.


أفضل المناطق المناسبة لإجراء الحقن بها:

◀ الفخذان


◀ البطن - باستثناء المنطقة المحيطة بالسرة.

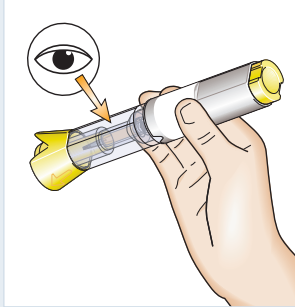

يرجى فحص سلامة الأقلام الجاهزة قبل استخدامها من خلال نافذة المراقبة.

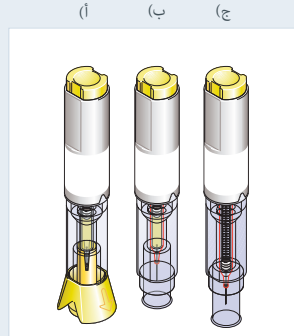


(أ) قبل الحقن، مع غطاء الحماية
(ب) بعد إزالة غطاء الحماية، قبل الحقن
(ج) بعد الحقن

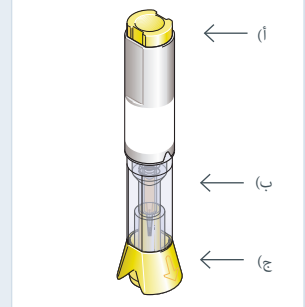


(أ) زر الحقن
(ب) نافذة المراقبة
(ج) غطاء الحماية

3 وضع القلم

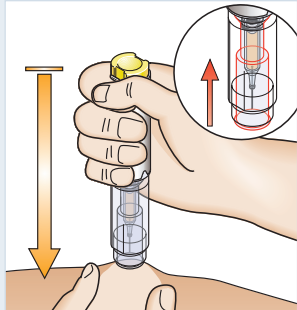


ضع القلم الجاهز عمودياً على تجعيدة الجلد. اضغط القلم الجاهز بثبات على تجعيدة الجلد حتى يتم إزاحة غطاء حماية الإبرة إلى الخلف (أدبوس شفاف)، لكي تحرر بذلك زر الحقن.

2 تشكيل تجعيدة بالجلد

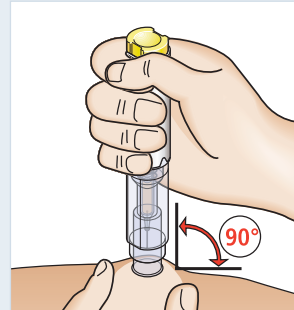


شكل بواسطة إصبعين تجعيدة بالجلد. أمسك تجعيدة الجلد حتى تُكتمل الحقن تمامًا.

1 أنزع غطاء الحماية بشكل مستقيم إلى أعلى

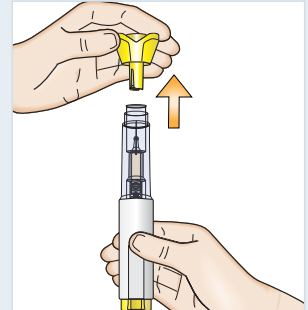


أنزع غطاء الحماية الأصفر بشكل مستقيم إلى أعلى وذلك قبل الحقن مباشرة بفترة قصيرة.

5 سحب القلم

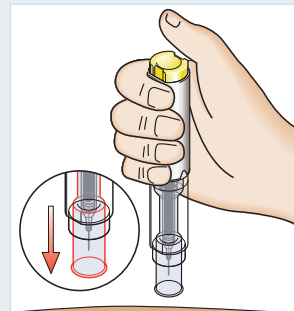

اسحب القلم الجاهز بحرص وبشكل مستقيم للخارج. اضغط على موضع الحقن باستخدام ضمادة. يتم حماية الإبرة تلقائيًا. بعد إتمام الحقن بنجاح، يمكن التخلص من الأقلام الجاهزة في المهملات المنزلية.

4 الحقن

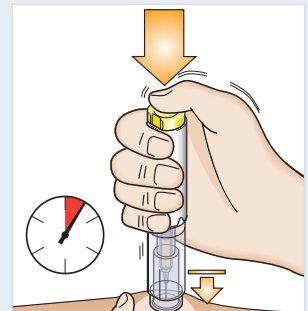

أطلق زر الحقن، بينما تظل ضاغطة على القلم الجاهز على تجعيدة الجلد. يبدأ الحقن مع إصدار صوت نقر. انتظر لمدة 5 ثوانٍ حتى يتم حقن السائل كاملاً.