
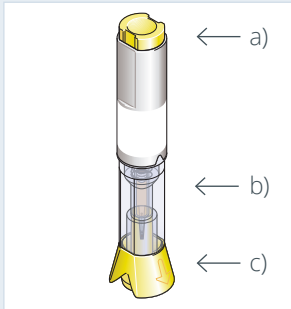


RÉGIONS CORPORELLES POSSIBLES POUR L'AUTO-INJECTION


Afin de prévenir toute irritation cutanée, il est conseillé de choisir un site d'injection différent pour l'administration hebdomadaire. N'utilisez le stylo injecteur prérempli que sur une peau nettoyée.

Les sites les plus appropriés pour l'injection sont:


- ▶ les cuisses
- ▶ le ventre – à l'exception de la zone autour du nombril

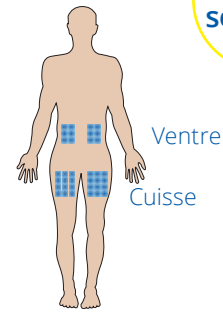

a) Bouton d'injection
b) Fenêtre de visualisation
c) Capuchon

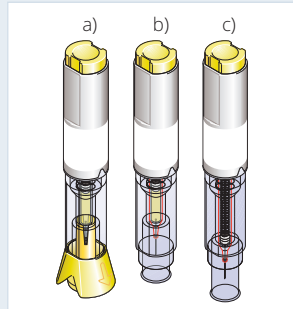


a) avant l'injection, avec capuchon
b) après le retrait du capuchon, avant l'injection
c) après l'injection

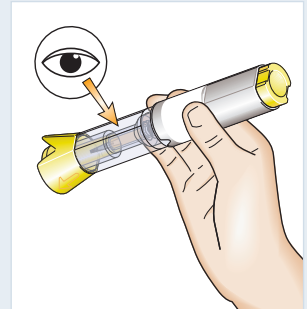


Veillez vous assurer que le stylo-injecteur prérempli est intact à travers la fenêtre de visualisation avant de l'utiliser.

1 Retrait du capuchon à la verticale

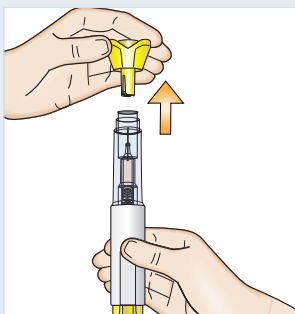


Retirez le capuchon jaune juste avant l'injection en le tirant vers le haut à la verticale.

2 Formation d'un pli de peau

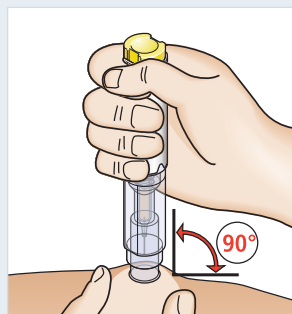


Formez un pli de peau à l'aide de deux doigts. Maintenez le pli de peau jusqu'à ce que le liquide soit entièrement injecté.

3 Positionnement

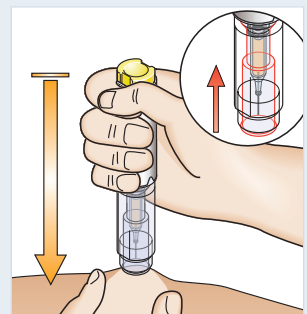


Appliquez le stylo-injecteur prérempli de manière perpendiculaire sur le pli de peau. Appuyez fermement le stylo-injecteur prérempli sur le pli de peau afin de faire remonter le pare-aiguille (tube transparent) et ainsi pouvoir déverrouiller le bouton d'injection.

4 Injection

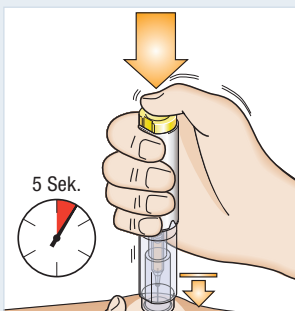

Déclenchez le bouton d'injection tout en continuant à maintenir le stylo-injecteur prérempli sur le pli de peau. L'injection démarre en émettant un clic audible. Attendez 5 secondes, jusqu'à ce que le liquide ait été entièrement injecté.

5 Retrait/élimination

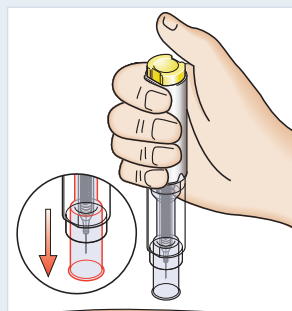

Tirez le stylo-injecteur prérempli avec précaution et à la verticale. Appuyez sur le site d'injection à l'aide d'une compresse. L'aiguille est automatiquement recouverte. Une fois l'injection effectuée, le stylo-injecteur prérempli peut être éliminé avec les ordures ménagères.