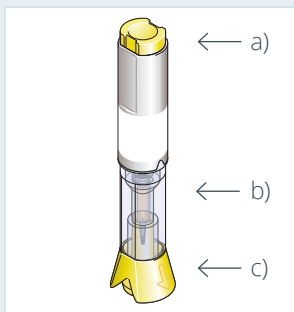
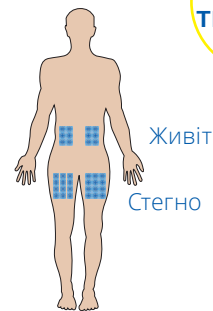


**МОЖЛИВІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВВЕДЕННЯ ІН'ЄКЦІЇ**

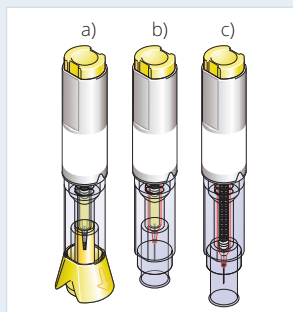
З метою запобігання виникненню подразнень на шкірі кожний тиждень обирають нове місце для введення ін'єкції. Застосовуйте готову ручку тільки після очищення шкіри.

**Найкраще для ін'єкції підходять такі місця:**

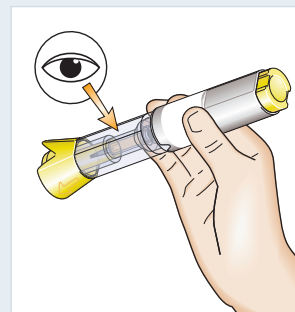
- ▶ стегно;
- ▶ живіт, окрім зони навколо пупа.



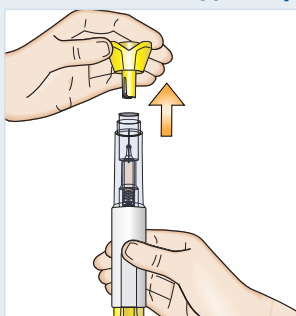
- a) Кнопка для ін'єкції;
- b) віконце;
- c) захисний ковпачок.



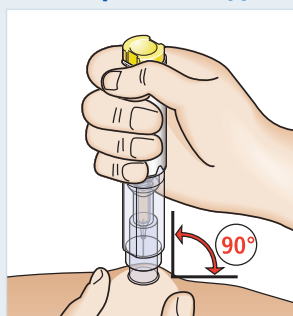
- a) Перед ін'єкцією, з захисним ковпачком;
- b) перед ін'єкцією, без захисного ковпачка;
- c) після ін'єкції.



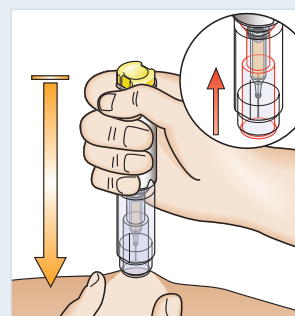
Перед застосуванням готової ручки перевірте її на наявність пошкоджень через віконце.

**1 Зняття захисного ковпачка одним рухом**

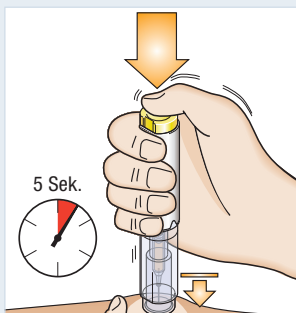
Безпосередньо перед ін'єкцією зніміть жовтий захисний ковпачок прямим рухом вгору.

**2 Утворення шкірної складки**

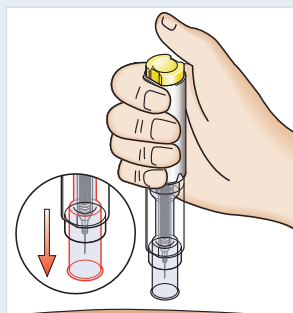
Двома пальцями утворіть шкірну складку. Утримуйте складку, доки Ви не введете ін'єкцію повністю.

**3 Розміщення**

Встановіть готову ручку вертикально на шкірну складку. Міцно притискайте готову ручку до складки, доки Ви не відсунете захисне пристосування для голки (прозору трубку), щоб таким чином розблокувати кнопку для ін'єкції.

**4 Введення ін'єкції**

Встановіть готову ручку вертикально на шкірну складку. Міцно притискайте готову ручку до складки, доки Ви не відсунете захисне пристосування для голки (прозору трубку), щоб таким чином розблокувати кнопку для ін'єкції.

**5 Вилучення / утилізація**

Обережно прямим рухом догори вилучіть готову ручку. Притисніть тампон до місця ін'єкції. Захист голки забезпечується автоматично. Після завершення ін'єкції Ви можете утилізувати готову ручку разом з побутовими відходами.