



1 raz w
tygodniu

OBSZARY CIAŁA DO SAMODZIELNEGO WSTRZYKNIĘCIA


Aby uniknąć podrażnień skóry, na każdą cotygodniową dawkę wybiera się inne miejsce wstrzyknięcia. Używać wstrzykiwacza wyłącznie na oczyszczonej skórze.

Do wykonania wstrzyknięcia najbardziej odpowiednie są następujące miejsca:


- ▶ uda
- ▶ brzuch — z wyjątkiem okolicy pępka

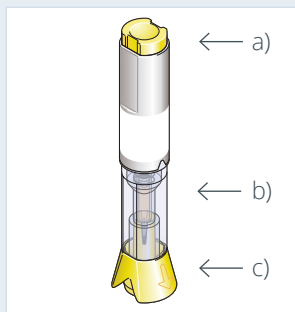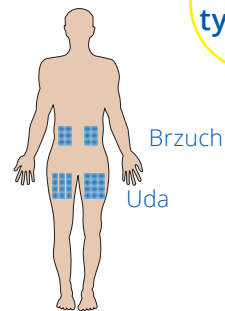

- a) Przycisk do wstrzykiwania
- b) Okienko
- c) Nasadka ochronna

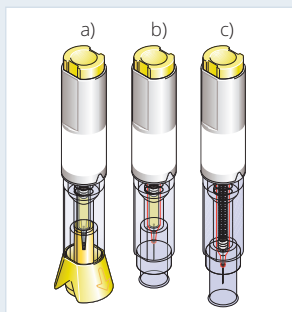


- a) Przed wstrzyknięciem, z nasadką ochronną
- b) Po zdjęciu nasadki ochronnej, przed wstrzyknięciem
- c) Po wstrzyknięciu

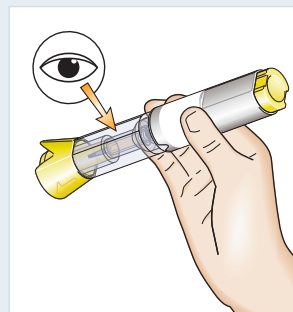


Przed zastosowaniem sprawdzić wstrzykiwacz przez okienko, czy jest w stanie nienaruszonym.

1 Ściągnięcie nasadki ochronnej prostym ruchem

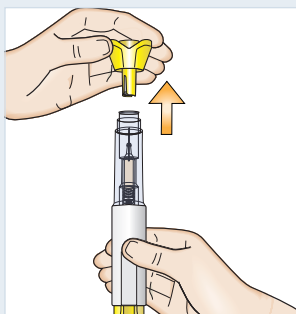


Bezpośrednio przed wstrzyknięciem ściągnąć prostym ruchem do góry żółtą nasadkę ochronną.

2 Utworzenie fałdu

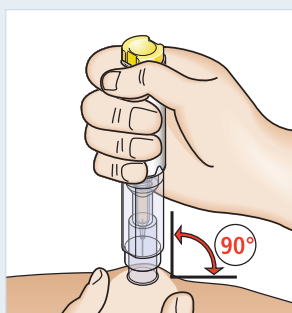


Dwoma palcami utworzyć fałd skórny. Fałd skórny trzymać aż do zakończenia wstrzyknięcia.

3 Umieszczenie

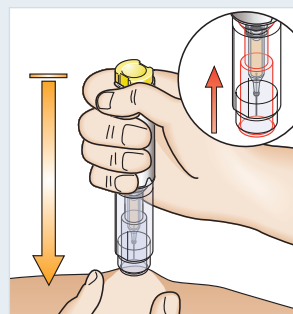


Przyłożyć wstrzykiwacz prostopadle do fałdu skórno. Przycisnąć wstrzykiwacz do fałdu skórno aż do odsunięcia osłony igły (przezroczystej rurki), co powoduje odblokowanie głowicy wstrzykiwacza.

4 Wstrzyknięcie

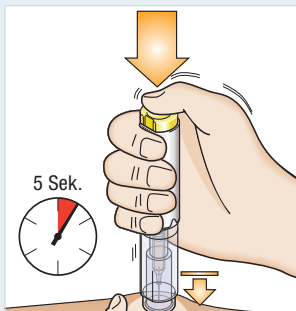

Nadal dociskając wstrzykiwacz do fałdu skórno, zwolnić przycisk do wstrzykiwania. Wstrzyknięcie rozpoczyna się ze słyszalnym kliknięciem. Odczekać 5 sekund aż do całkowitego wstrzyknięcia płynu.

5 Wyciągnięcie/usuwanie

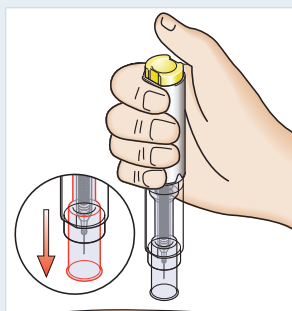

Ostrożnie wyciągnąć prosto wstrzykiwacz. Przycisnąć wacik do miejsca wstrzyknięcia. Igła jest automatycznie zabezpieczona. Po wykonaniu wstrzyknięcia wstrzykiwacz można usunąć z odpadami domowymi.