
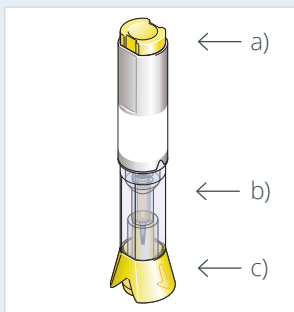


ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ТЕЛА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИНЪЕКЦИИ


Во избежание раздражений кожи следует выбирать для каждой еженедельной инъекции разные области тела. Используйте готовую шприц-ручку только на очищенной коже.

Для инъекций лучше всего подходят следующие места:


- ▶ бедро;
- ▶ живот - кроме зоны вокруг пупка

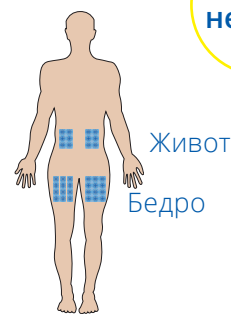

- a) Кнопка спуска
- b) Окно
- c) Защитный колпачок

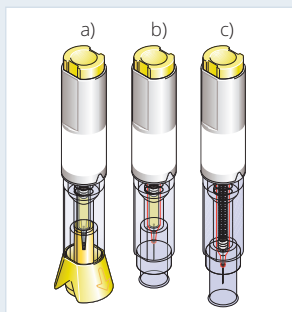


- a) Перед инъекцией, с защитным колпачком
- b) После снятия защитного колпачка, перед инъекцией
- c) После инъекции

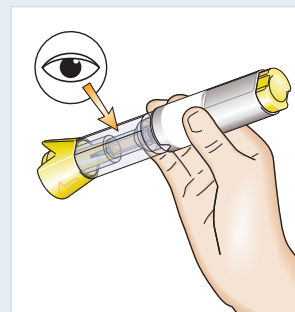


Пожалуйста, перед применением проверьте, что готовая шприц-ручка не повреждена, посмотрев на окно.

1 Снятие

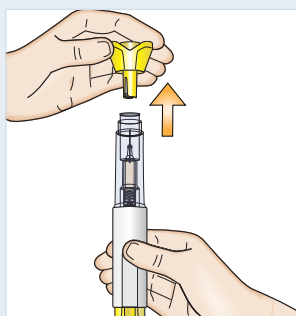


Непосредственно перед инъекцией снимите желтый защитный колпачок движением вверх.

2 Формирование

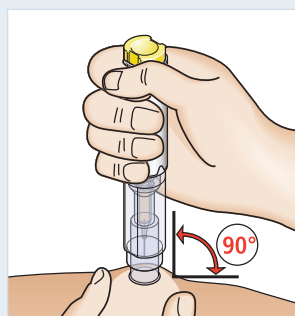


Возьмите двумя пальцами кожу в складку. Держите складку кожи до полного завершения инъекции

3 Позиционирование

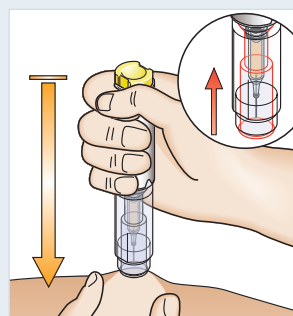


Приложите готовую шприц-ручку к кожной складке под прямым углом. Плотно прижмите готовую шприц-ручку к кожной складке так, чтобы отодвинуть защиту иглы (прозрачную трубку) и разблокировать кнопку инъекции

4 Введение вещества

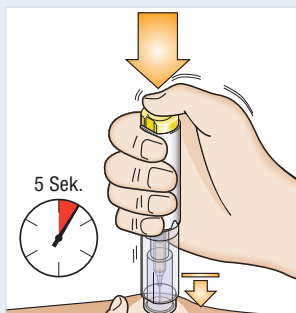

Нажмите на кнопку спуска, удерживая готовую шприц-ручку по-прежнему прижатой к складке кожи. Во время начала инъекция слышен щелчок. Подождите 5 секунд до полного введения раствора.

5 Извлечение / утилизация

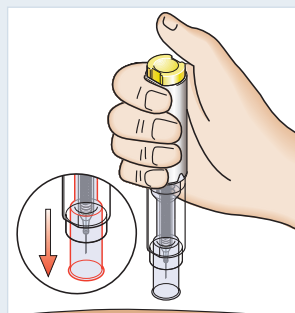

Извлеките осторожно и прямо готовую шприц-ручку. Прижмите тампон к месту инъекции. Игла устанавливается в защитном положении автоматически. После проведения инъекции готовую шприц-ручку можно выбросить в бытовой мусор.