
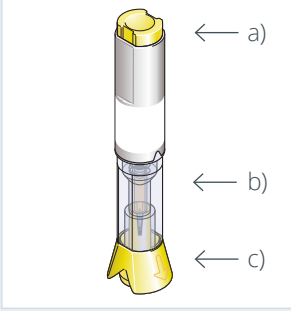


VÜCUTTA KENDİ KENDİNİZE ENJEKSİYON YAPABİLECEĞİNİZ BÖLGELER


Cilt tahrişlerinden kaçınmak için her hafta farklı bir enjeksiyon yeri seçilmelidir. Kullanıma hazır kalemi sadece temizlenmiş bir cilt üzerinde kullanın.

Enjeksiyon için en uygun bölgeler şunlardır:

- ▶ Üst uyluk
- ▶ Karın— göbek deliğinin çevresindeki alan hariç

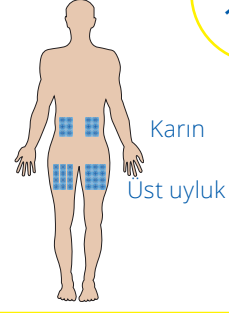

- a) Enjeksiyon düğmesi
- b) Kontrol penceresi
- c) Koruyucu kapak

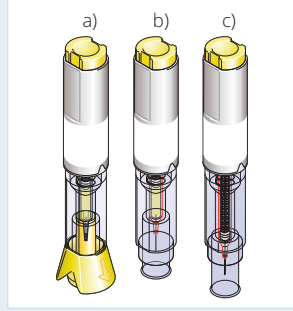


- a) Enjeksiyondan önce, koruyucu kapakla
- b) Koruyucu kapak çıkarılmış, enjeksiyondan önce
- c) Enjeksiyondan sonra




Lütfen kullanıma hazır kalemi kullanmadan önce kontrol penceresinden sağlamlığını kontrol ediniz.

1 Koruyucu kapağı düz olarak çekip çıkarma

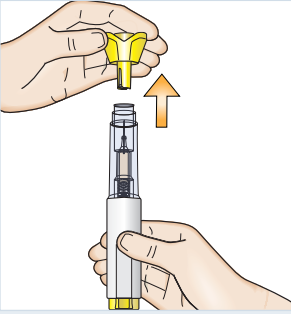


Sarı renkli koruyucu kapağı enjeksiyondan hemen önce düz olarak yukarıya doğru çekerek çıkarın.

2 Deri kıvrımı oluşturma

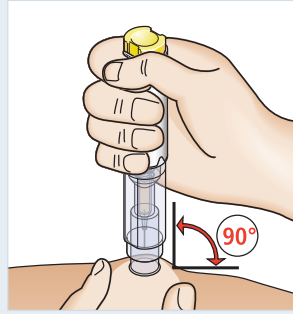


İki parmağınızla bir deri kıvrımı oluşturun. Enjeksiyon tamamlanincaya kadar deri kıvrımını tutun.

3 Konumlandırma

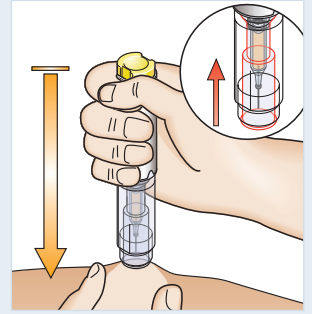


Kullanıma hazır kalemi cilt kıvrımının üzerine dik olarak yerleştirin. Kullanıma hazır kalemi, enjeksiyon düğmesini açmak için, iğne koruması (şeffaf boru) geri itilinceye kadar, cilt kıvrımının üzerine sıkıca bastırın.

4 Enjekte etme

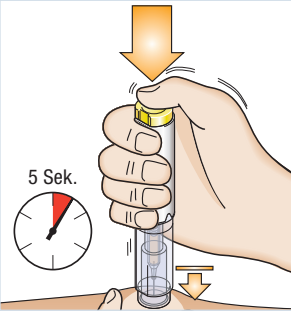

Kullanıma hazır kalemi deri kıvrımına bastırmaya devam ederek enjeksiyon düğmesini tetikleyin. Enjeksiyon bir tık sesiyle başlayacaktır. Sıvı tümüyle enjekte edilinceye kadar 5 saniye bekleyin.

5 Dışarı çekme

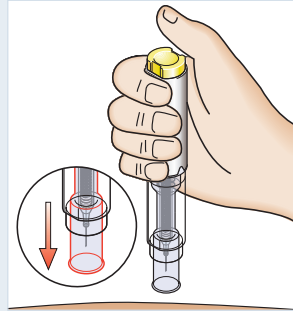

Kullanıma hazır kalemi düz olarak dikkatlice dışarıya çekin. Enjeksiyon noktasına bir tampon ile bastırın. İğne otomatik olarak korunacaktır. Enjeksiyon tamamlandıktan sonra, kullanıma hazır kalemi ev çöpüne atabilirsiniz.